

RIKTLINJE RUTIN

Dokumentnamn: Rutin för viktmätning med adapter som kopplas på golvlyft/taklyft				
Framtagen av: Enhetschef Södergården, arbetsterapeut, medicinskt ansvarig sjuksköterska	Gäller from: 2024-11-06	Gemensam med Regionen: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej	Gäller egen regi: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Gäller privat regi: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej	Processhänvisning: Hemsjukvårds- process, verkställar- process
Godkänd av: Socialchef med ledningsgrupp	Gäller tom: Tills vidare			

Revisionshistorik

Datum för revidering och uppdatering	Beskrivning
2024-11-06	Ny rutin

Bakgrund

För att väga vårdtagare/brukare/patienter inom verksamheterna i socialförvaltningen används olika former av personvågar. För de som inte kan stå utan stöd finns både sittvåg och rullstolsvåg. Båda dessa modeller kan upplevas tunga att förflytta och transportera. För de personer som förflyttas med golvlyft eller taklyft finns adapter för viktmätning som kopplas på lyften.

Tillvägagångssätt

Viktmätningen och hanteringen av adaptorn ska göras i enlighet med medföljande bruksanvisning/instruktion. För att utföra viktmätning med adapter krävs genomgången utbildning och erhållet intyg då momentet kan innebära risker vid bort- och påkoppling av lyftbygel för att kunna montera adaptorn.

På Södergården finns två adapterar till taklyftarna av modell Molift Air. Dessa förvaras i laddrummet bredvid vaktmästarrummet i källaren och kan användas till personer som har en personlig lyftsele utprovad.

För hemtjänst finns en vågadapter till golvflyft i förrådet för akuthjälpmiddel i källaren på Tallgården, längst ner till vänster i korridoren under korttid fritids.

Ansvar/omfattning

Denna rutin omfattar samtlig personal inom verksamheterna i socialförvaltningen som hanterar adapter för viktmätning som kopplas på golvlyft/taklyft.

Enhetschef ansvarar för:

- Att säkerställa att omvårdnadspersonal genomgår utbildning och erhåller intyg
- Att säkerställa att endast behörig omvårdnadspersonal utför momentet

Omvårdnadspersonal ansvarar för:

- Att arbeta i enlighet med rutinen
- Att väga vårdtagare/brukare/patienter på lämplig våg
- Att kontakta rehab inför första vägning med adapter i ordinärt boende så att de kan säkerställa att golvlyften är kompatibel med adaptern

Arbetsterapeut/fysioterapeut/sjukgymnast ansvarar för:

- Att utbilda omvårdnadspersonal i momentet och utfärda intyg
- Kontakt med Medelpunkten vid behov av reparation eller dylikt
- Att säkerställa att golvlyft i ordinärt boende är kompatibel med vågadaptern

Referensdokument

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30)

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453)

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387)

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659)

Patientlagen (SFS 2014:821)